



Aktivitetsoversikt – brukermanual

Første steg – aktivere aktivitetsoversikt for hele sonen eller helt ned til boenhet

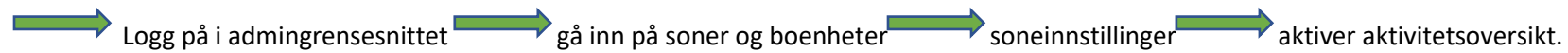


Under ser man en aktivitetsoversikt for de siste 24 timene. Denne oversikten gir oss innsikt på aktiviteten til en innbygger – om den endrer seg eller er annerledes enn vi antok.

Aktivitetsoversikt ^

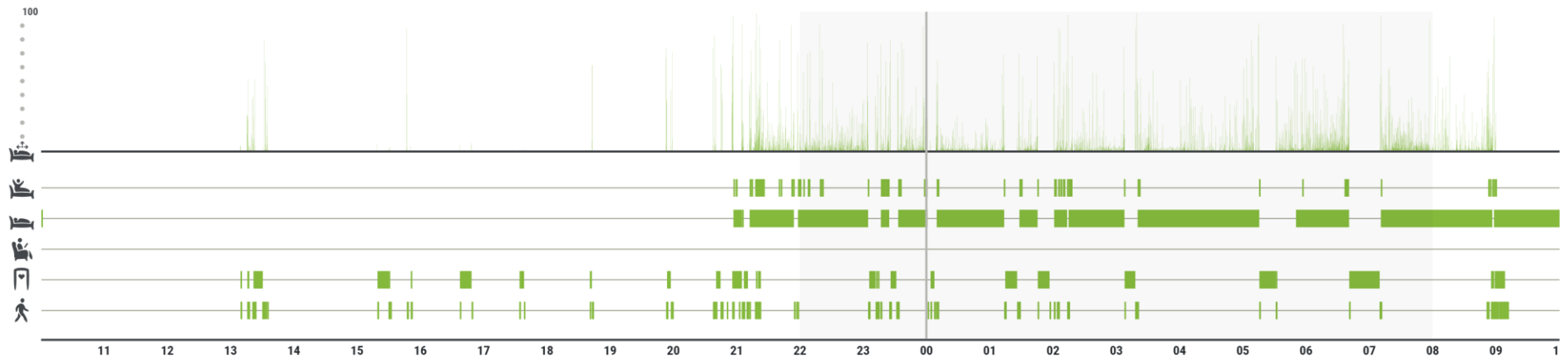

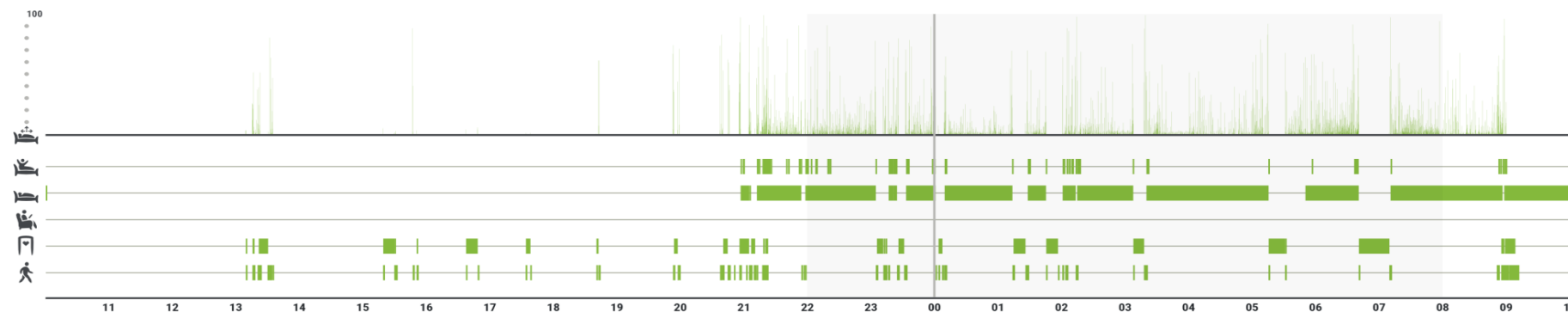

Aktivitetsoversikt



forklarer bevegelse i seng. Har personen beveget seg i seng i løpet av nattet og er det tidspunkt hun/han er mer aktiv enn ellers



Forteller oss om personen har satt seg opp i seng – sammenlikner vi med  kan vi også se om personen forlot sengen. Om vi samtidig ser på  – bevegelse i rom, kan man tyde om personen ble vekket av et eventuelt fysisk tilsyn og satt seg opp i sengen.




Forteller oss om personen ligger i sengen. Dette punktet kan fortelle oss om personen ligger mer eller mindre i seng enn antatt – og kan bidra til at de ansatte kan få personen mer opp å gå dersom det viser seg at personen ligger mye i seng.



Forteller om personen sitter mye i stol.



Forteller oss om hvor hyppig personen er på badet. Dette punktet kan indikere en begynnende UVI dersom mønsteret endres til mer hyppig baderomsbesøk. Det kan også fortelle de ansatte om personen er urolig på natt og mye ut og inn av bad/seng (se )



Forteller om bevegelse i rommet – dette vil også gjelde de ansatte. Man vil også kunne se om personen er mye oppe på nattetid eller er aktiv på dagtid.

Eksempler fra bruk av funksjonen:

1. En person lå mer i seng enn antatt. De ansatte fikk nytt fokus på å få personen i aktivitet for å sikre nødvendig sirkulasjon og unngå liggesår. De koblet også på ergoterapeut for få det beste tilbudet for innbyggeren.
2. Via aktivitetsoversikt ser de ansatte at en innbygger viser økende toalettbesøk, de kobler tidlig på legen som bekrefter en begynnende UVI. Her unngår de at innbyggeren går lenge med en ubehandlet UVI.
3. Aktivitetsoversikten kan gi en pekepinn på om innbyggeren trenger med innsovningsmedisin dersom de ser at personen våkner fort etter han/hun har sovnet. Samme kan gjelde for sovemedisin.