

# NOCOSPRAY BRUKSANVISNING

LES NØYE KOMPLETT BRUKERMANUAL SOM FØLGER MED NOCOSPRAY ROBOTEN!



**1** Bruk hansker og øyebeskyttelse ved håndtering av all kjemi som benyttes til roboten.



**2** Sjekk at flasken inneholder tilstrekkelig mengde kjemi. Merk av nivået *før* og sjekk forbruk *etter* prosedyren.




**3** Skru sprededyse fast på flasken.  
Ta vare på korken.



**4** Klikk sprededyse med flasken på plass i Nocospray roboten. Sjekk at dysen sitter fast.



**5** Plasser Nocospray roboten på et fast underlag. Velg et hjørne for optimal effekt.

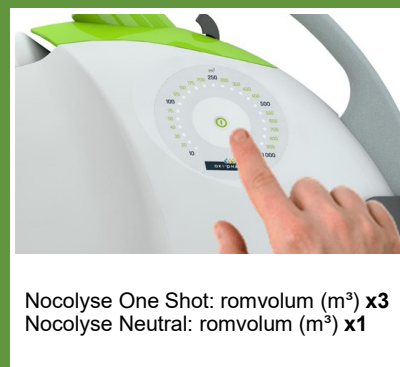

Nocolyse One Shot: romvolum (m<sup>3</sup>) x3  
Nocolyse Neutral: romvolum (m<sup>3</sup>) x1

**6** Innstill korrekt romvolum. Innstilling avhenger av rommets størrelse og type kjemi som benyttes.



**7** Trykk start i senter av tallskiven. Roboten piper i 15 sekunder og starter automatisk.

**Forlat rommet !**



Nocolyse One Shot: **2 timer** kontakttid  
Nocolyse Neutral: **30 min.** kontakttid

**8** Rommet skal være lukket/låst under diffusjonen og i hele kontakttiden.

Heng opp dørplakat med varsel om «Ingen adgang!».



**9** Løsne flasken. Skru på korken igjen. Skyll sprededyse og slange under vann. Klikk dysen tilbake på plass i roboten.