



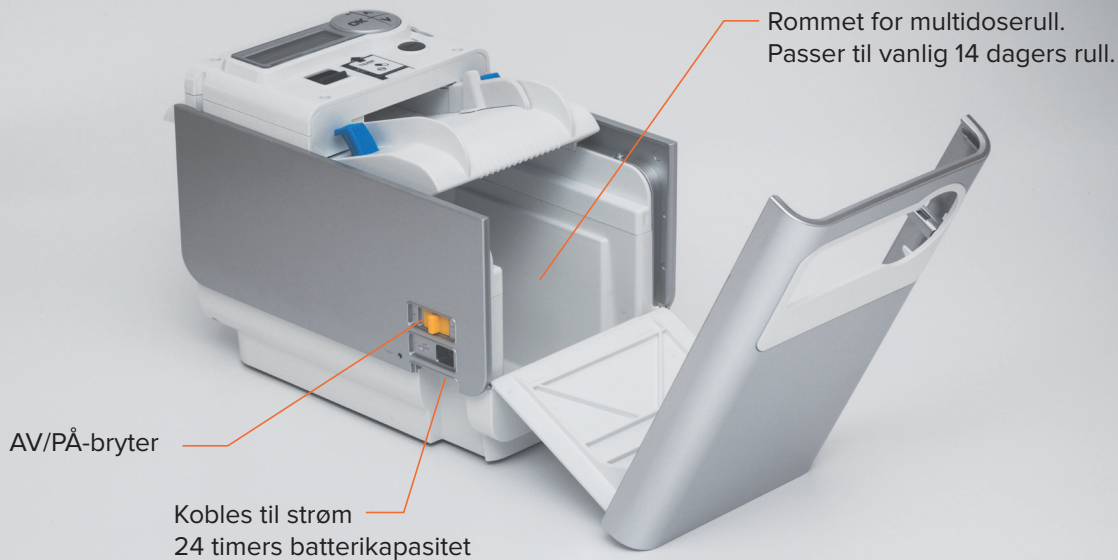

Medido multidosedispenser

Brukerinformasjon

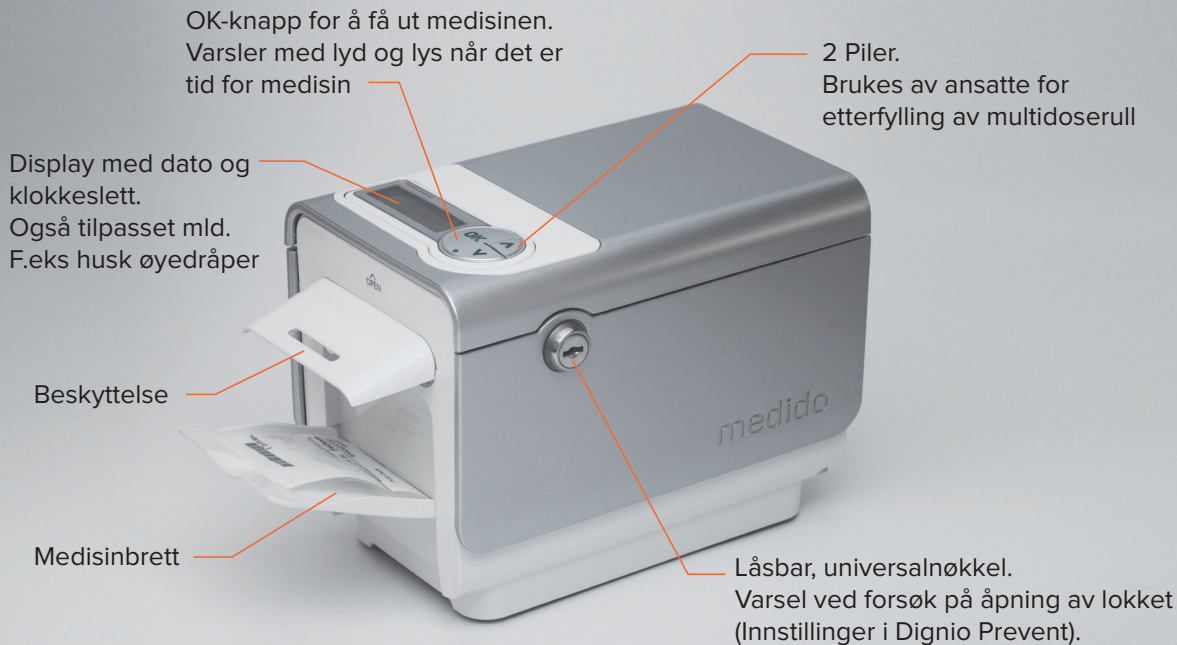

Hvordan ta medisinen



01

Når det er tid for å ta medisinen varsler Medido med lyd og lys.

På skjermen står det: "Tid for medisin
Trykk OK"



02

Trykk på "OK-knappen".



03

Vent til posen faller ned på brettet.



04

Ta medisinen.

Når du har glemt å ta medisinen



01

Knappene vil blinke blått og grønt.



02

Hold "OK-knappen" nede i 5 sekunder.



03

Vent til posen faller ned på brettet.



04

Ta medisinen.

Å ta ut medisinen før tiden

(Gjelder der Medido er stilt inn med forhåndsutmating)



01

Hold "OK-knappen" nede i 5 sekunder.



02

Lyset på knappene vil skifte fra grønt til blått. Du vil høre en varslingslyd og posen mates ut.

Vent til posen faller ned på brettet.



03

Ta medisinen.

Kontaktinformasjon Hjemmesykepleien

dignio

www.dignio.no