

# Midlertidig stans

Man kan sette dispenseren i pausemodus i situasjoner hvor tjenestemottakeren er borte fra dispenseren for en kortere periode, og medisinerung skal utføres på annen måte.


Midlertidig stans kan utføres både fra dispenseren og fra Fjernpleiesystemet.

**Merk:** Aktivering av dispenseren kan kun utføres lokalt på medisindispenseren.

## Å stanse medisindispening på dispenseren:

Ta på skjermen eller trykk på medisinknappen for å aktivere dispenseren. Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.


1. Logg deg på dispenseren med brukernavn og passord / adgangskort / RFID-brikke.

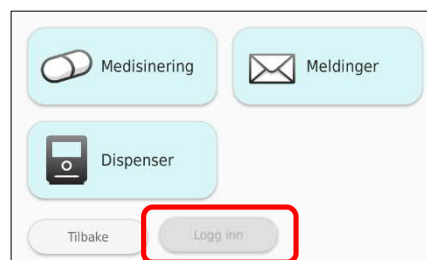

3. Sett dispenser i pausemodus ved å trykke **Medisinerung > Neste > Stans medisindispening**



4. Medisindispenseren ber deg bekrefte kommandoen og melder fra når dispenseren er deaktivert.

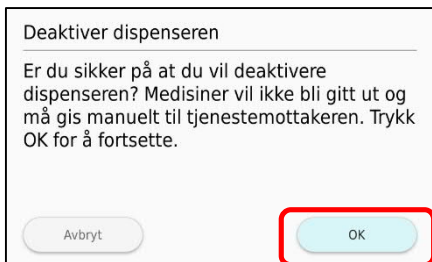

5. Logg deg til slutt ut av medisindispenseren ved å trykke på **Meny > Logg ut**




Dersom tjenestemottaker skal ha med seg resten av rullen:

1. **Logg inn > Meny > Medisinering > Endre medisinering manuelt**
2. Ta ut rullen og sett den tomme spolen tilbake i maskinen.
3. Roboten vil registrere at det ikke er medisin i roboten, og spørre om du vil prøve igjen eller avbryte - velg Avbryt.
4. For å stanse alarm om tom dispenser velger du deretter **Meny > Medisinering > Neste > Stans medisinutdeling**

**VIKTIG: La dispenser stå i hjemmet, fortsatt påslått og koblet til strøm.**

**Å stanse medisinutdeling fra Fjernpleiesystemet:**

1. Logg deg inn med brukernavn og passord.
2. Finn fram siden til den aktuelle tjenestemottakeren ved å bruke søkefeltet øverst på siden, eller velg «Tjenestemottakere» i hovedmenyen, og finn den aktuelle brukeren i listen.
3. Klikk på knappen «Stans medisinutdeling» nederst til høyre på siden.
4. NB: Dispenseren må aktiveres igjen på selve dispenseren, siden den mest sannsynlig vil inneholde utgåtte medisiner.
5. Når medisinutdeling er stanset, blir knappen grå.

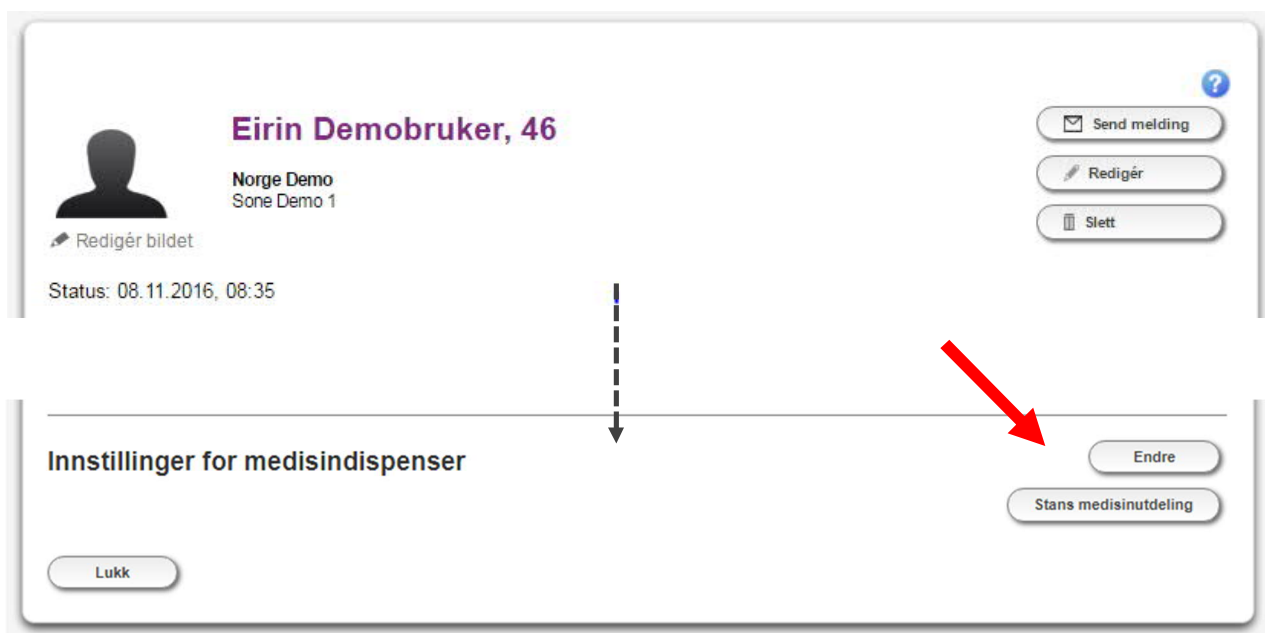

## Å gjenoppta medisinutdeling:

Når dispenseren skal aktiveres, kan det ligge utdatert medisin i dispenseren.

**Reaktivering av dispenseren kan derfor kun utføres lokalt på medisindispenseren, og ikke fra Fjernpleiesystemet.**

1. Ta på skjermen for å aktivisere menyen. Logg deg på med brukernavn og passord, kort eller RFID-brikke.
2. Klikk deg fram til samme knapp som ble brukt for å stanse medisinerings; knappen heter nå "Gjenoppta medisinutdeling".
3. Åpne dispenseren og fjern medisinposer som har utdatert dato og klokkeslett.
4. Montere rullen tilbake i medisinkammeret som ved en vanlig etterfylling.
5. Sjekk at dispenseren får lest posene, og er tilbake i normal drift.  
Når dispenseren er klar, kan du sjekke neste medisintid ved å trykke på knappen.
6. Husk å alltid logge deg ut før du forlater dispenseren.

**Spørsmål? Kontakt Evondos support på tlf. 90 84 07 03, eller send ditt spørsmål til [support@evondos.no](mailto:support@evondos.no)**