


7. Tømming av skuffen for utelatte medisiner

Dersom skuffen for utelatte medisiner blir full før neste planlagte etterfylling, finnes det en egen prosedyre for å tømme skuffen.

1. Ta på skjermen eller trykk på medisineringsknappen for å aktivere medisindispenseren. Medisindispenseren er aktivert når lyset på skjermen er på.
2. Logg deg inn i medisindispenseren med ID-brikke eller brukernavn og passord.
3. Start ved å trykke på «**Meny**», «**Medisinering**» og «**Tøm skuffen for medisin som ikke er tatt**» på skjermen til medisindispenseren.

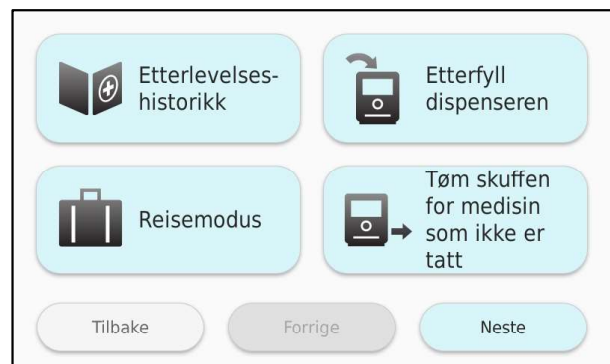

4. . Følg instruksjonene medisindispenseren gir deg: Dra skuffen ut ved hjelp av fingerhullet, tøm skuffen for utelatte medisiner og skyv til slutt skuffen tilbake på plass.
5. Logg deg ut igjen ved å trykke på «**Meny**» og «**Logg ut**».
6. Ta med deg de utelatte medisinposene og behandle dem slik reglene tilsier.

